



## Lisa A (Kangaroo enteraalse toitmise pumbakomplektide voolikutes õhulekke kontrollimine)

**Kontrollimaks toitmiskomplektivooliku õhulekkeid (vt alltoodud näide), järgige allkirjeldatud samme.**

- Olles toitmiskomplekti paigaldanud ja valmis seadnud, vajutage pumbal nuppu „Run“ (alusta).
- Jälgige pärast 30 sekundit pumba ja patsiendi vahelist voolikut, et kontrollida, kas voolikusse siseneb õhku.
- See ei ole haruldane ega probleemiks, kui toitmisvoolikusse siseneb vähesel määral õhku (umbes 1,3 cm), kui pump on kontrollitud ummistusi.
- **Ärge kasutage toitmiskomplekti**, kui märkate voolikus ühte õhutaskut, mis on pikem kui 2,5 cm.
- **Ärge kasutage toitmiskomplekti**, kui märkate voolikus mitut õhumulli, mis on kokku pikemad kui 2,5 cm.

### **MÄRKUS.**

Õhu sattumine voolikusse on mööduv probleem ning seda ei ole märgatud kõigi partiide puhul. Seega ei tähenda defektne toitmiskomplekt, et kogu partii on defektne.



\*See on näide ja õhk voolikus ei pruugi olla nii selgelt eristatav, nagu näidatud pildil.